



SUORITUS / NÄYTTEENOTTAMINEN

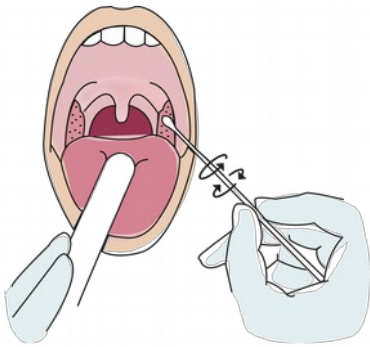

Kerää nielunäyte pakkauksessa olevalla steriilillä näytepuikolla. Ota näyte nielun takaosasta, nielurisoista.


1

Laita 4 kokonaista tippaa **Reagenssi 1:tä** ekstrahointiputkeen

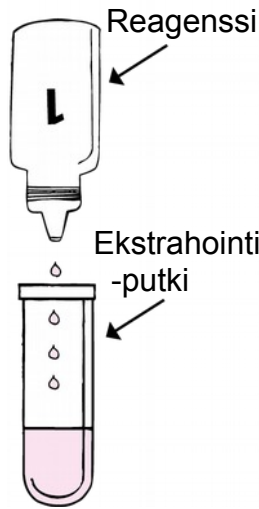

2

Laita 4 kokonaista tippaa **Reagenssi 2:tä** ekstrahointiputkeen

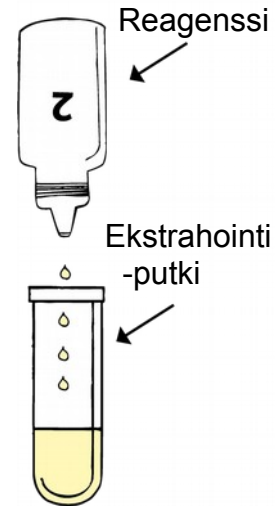


3

1 minuutti




NÄYTE-
PUIKKO

Laita näytepuikko ekstrahointiputkeen, pyöräytä puikkoa liuoksessa muutamia kertoja ja jätä puikko ekstrahointiputkeen vähintään **1 minuutiksi**.

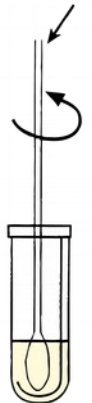

4

Purista neste ulos näytepuikon päästä pyörittämällä puikkoa putken sisäpintaa vasten ja puristamalla putkea samalla kun puikko vedetään pois putkesta.

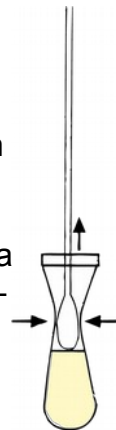


5

PIDÄ TÄSTÄ



Aseta testiliuska putkeen vähintään 1 minuutiksi. Lue tulos **5 minuutin kuluttua**. Älä tulkitse tulosta 10 minuutin jälkeen.

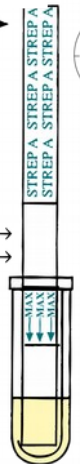

TESTIN TULKITSEMINEN

Tulos on positiivinen, jos kaksi juovaa on näkyvissä. Kontrollialueella (C) pitää olla sininen juova, ja testialueella (T) pitää näkyä punertava juova.

Punertavan värin intensiteetti riippuu streptokokin määrästä näytteessä.

Vaalea roosakin voidaan tulkita positiiviseksi tulokseksi.

